



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)



## Medizinprodukt

### Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# Tyrosur<sup>®</sup>

CareExpert Wundgel

### Was ist Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel und wofür wird es angewendet?

Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel ist ein Hydrogel, das dem Prinzip der ideal-feuchten Wundbehandlung entspricht und somit zur Unterstützung des natürlichen Wundheilungsprozesses bei oberflächlichen Hautschädigungen sowie leichten Verbrennungen (z.B. Sonnenbrand) beiträgt.

### Wirkprinzip

Die ideal feuchte Wundbehandlung ist seit Langem etabliert. Das Hydrogel reguliert die Feuchtigkeit in der Wunde, überschüssiges Wundsekret kann abfließen und die Wunde wird feucht gehalten, was den Heilungsprozess begünstigt.

### Wann darf Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel nicht angewendet werden?

Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen Inhaltsstoffe.

### Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung von Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel erforderlich?

Bei Anwendung in Augennähe: Das Gel darf nicht in die Augen gelangen, da dies zu Brennen führen kann.

### Darf Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Grundsätzlich sollte eine Anwendung von Präparaten – egal ob sie auf die Haut aufgetragen oder eingenommen werden – während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

### Wie wenden Sie Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel an?

Tragen Sie Tyrosur<sup>®</sup> CareExpert Wundgel mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen auf.





### Wie lange dürfen Sie Tyrosur® CareExpert Wundgel anwenden?

Tyrosur® CareExpert Wundgel ist zur Unterstützung während des natürlichen Wundheilungsprozesses bestimmt. Sollten sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintreten, suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker auf.

### Welche unerwünschten Nebenwirkungen kann Tyrosur® CareExpert Wundgel haben?

Das Gel enthält Propylenglycol und kann daher Hautreizungen hervorrufen. In vereinzelt Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

### Was ist ferner zu beachten?

Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum. Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern. Nach Anbruch der Tube 6 Monate haltbar.

### Welche Inhaltsstoffe sind in Tyrosur® CareExpert Wundgel enthalten?

Das Gel enthält Carbomer, Dexpanthenol, Allantoin, Vitamin E, Trometamol, Propylenglycol, Cetylpyridiniumchlorid, Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser, Citronensäure, Xanthan-Gummi.

### Welche Packungen sind erhältlich?

Packungsgrößen: Packungen mit 25 g, 50 g und 100 g Gel

### Hersteller / Vertrieb Deutschland

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Herzbergstr. 3  
61138 Niederdorfelden  
Telefon: 06101/539-300  
Telefax: 06101/539-315  
Internet: <http://www.engelhard.de>  
e-mail: [info@engelhard.de](mailto:info@engelhard.de)



### Stand der Information

April 2020

CE  
0297

 Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand 04/20; PB1603103