



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

SCHRUNDEN KLEBER

BESCHREIBUNG

efasit® Schrunden Kleber schafft eine für die Wunde günstige Umgebung, indem er einen dünnen, haftenden Film bildet, der die Wunde vor äußeren Einflüssen schützt und isoliert und zugleich für schnelle Heilung und Schmerzlinderung sorgt.

- Verringert die Anzahl, Tiefe und Breite von Rissen.
- Lässt die Wunde besser heilen, indem er die Wundränder zusammenhält und die Wunde schützt. Dadurch wird verhindert, dass die Wunde sich wieder öffnet. Die Wundheilung wird somit unterstützt.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Fissuren, Risse und aufgesprungene Stellen an Händen und Füßen infolge von äußeren Einflüssen (Kälte, Reibung, aggressive Produkte, ...)
- Auch für kleine Rhagaden empfohlen

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Nur zur Anwendung auf der Haut. Nur auf lokal begrenzte Wunden auftragen. Nicht auf noch blutende Wunden oder infizierte (entzündete) Wunden auftragen. Nicht auf Verbrennungen auftragen. Kontakt mit äußeren und inneren Schleimhäuten vermeiden (Mund, Lippen, Vaginal- und Analschleimhäute). Direkten Kontakt mit den Augen und der Augenumgebung vermeiden. Kann Augenreizungen verursachen. Bei versehentlichem Kontakt die betroffene Stelle mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser spülen. Nicht schlucken. Nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Bestandteile anwenden. Nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren anwenden. Nach jedem Gebrauch den Spatel gründlich säubern, bevor Sie ihn wieder in das Fläschchen einführen. Vermeiden Sie, das Produkt für mehrere Personen zu verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei beschädigter Verpackung das Produkt nicht verwenden. Nicht nach dem angegebenen Verfallsdatum verwenden. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Zündquellen fernhalten. Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bei kleinen Rissen abwarten, bis die Blutung gestillt ist, und vor der Anwendung die Wunde säubern und trocknen. Produkt mit dem dazugehörigen Spatel so verteilen, dass die Wunde vollständig gefüllt und bedeckt ist.

Einige Sekunden trocknen lassen. Anwendung 2- bis 3-mal täglich wiederholen, bis die Wunde vollständig geheilt ist. Bei Bedarf lässt sich der Film entfernen. Dazu einfach einen Tropfen des Produkts auf die bestehende Schicht geben und alles sofort durch Abtupfen mit einem Mulltupfer entfernen. Nach jedem Gebrauch den Spatel säubern und das Fläschchen sorgfältig verschließen. Vermeiden Sie, das Produkt für mehrere Personen zu verwenden.

ZUSAMMENSETZUNG

Methacrylat-Copolymer, Nitrocellulose, Hilfsstoffe.

AUSSEHEN

Transparente, farblose Flüssigkeit. Verpackt in einem 7 ml Glasfläschchen mit Spatel.

LAGERBEDINGUNGEN

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Kühl und trocken lagern. Behälter fest verschlossen halten.

Medizinprodukt

Vertrieb:

Kyberg Medical GmbH

Keltenring 8

82041 Oberhaching

www.efasit.de, efasit@kyberg.de

AABC



Rev. 00
October 2023

