



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Vorbereitung

- 1 Hände mit Seife waschen und abtrocknen.
- 2 Öffnen Sie den Beutel mit der Testvorrichtung.
- 3 Verbandskasten öffnen und zur Hand haben.
- 4 Legen Sie die Testvorrichtung auf eine flache Oberfläche.
- 5 Nehmen Sie den Deckel von Fläschchen 1 ab. Stellen Sie es auf eine flache Oberfläche.

SCHRITT 1 BLUT ENTNEHMEN

- A Reiben Sie Finger und Hand, um den Blutfluss zu steigern.
- B Drehen Sie die Lanzettenspitze und ziehen Sie sie heraus. Entsorgen Sie die Spitze.
- C Setzen Sie die Lanzette seitlich auf die Fingerspitze. **FEST DRÜCKEN**
- D Reiben Sie den Finger, um einen **GROSSEN** Tropfen Blut zu erzeugen.
- E Lassen Sie 1 Tropfen in das Fläschchen 1 **FALLEN**. Drehen Sie den Deckel auf das Fläschchen 1.
- F Bringen Sie das Heftpflaster an.


SCHRITT 2 TEST

- G **4 MAL SCHÜTTELN** gesamte Flüssigkeit ausgießen. Abwarten, bis die Flüssigkeit verschwindet.
- H **4 MAL SCHÜTTELN** gesamte Flüssigkeit ausgießen. Abwarten, bis die Flüssigkeit verschwindet.
- I **4 MAL SCHÜTTELN** gesamte Flüssigkeit ausgießen. Abwarten, bis die Flüssigkeit verschwindet.

SCHRITT 3 ERGEBNIS ABLESEN

- KONTROLLE
- KONTROLLE TEST
- TEST
- NEGATIV**
Ihr Testergebnis ist negativ.
- POSITIV**
Positive Ergebnisse **MÜSSEN** von einem Arzt bestätigt werden.
- UNGÜLTIG**
Ihr Test hat nicht funktioniert.

Entsorgung

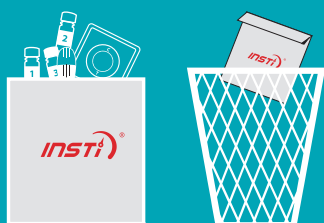

Legen Sie alle Artikel in den Umkarton zurück. Werfen Sie sie in einen Behälter.


Blut kann Infektionskrankheiten übertragen. Verschüttetes Blut aufwischen. In Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.



Hersteller:

www.insti.com

65-1348A) 02/2022

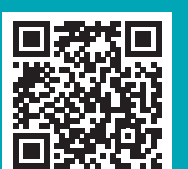

Scannen Sie Mich Zu Erfahren Sie Mehr