



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

DracoFoam

Zehenkappe

Dünne Schaumstoffwundauflage für Zehen

DracoFoam Zehenkappe ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage, die der Abdeckung der Wunde und Absorption des Exsudats dient. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, so dass diese dort abdampfen kann. **DracoFoam Zehenkappe** schafft ein idealfeuchtes Wundklima und ist somit für eine Vielzahl von chronischen und sekundär heilenden Wunden geeignet. Der Polyurethanschaum ist besonders flexibel, wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die Polyurethanfolie verhindert das Entweichen des Sekrets und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar.

Anwendungsgebiete:

DracoFoam Zehenkappe ist geeignet für Wunden mit mäßigem bis schwachem Exsudat aufkommen, z.B. oberflächliche chronische Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder Diabetisches Fußsyndrom, sowie akute Wunden wie Schürf- und Schnittwunden, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad, beispielsweise an den Zehen.

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Zehenkappe** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoFoam Zehenkappe** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen, die Wundauflage mit der weißen Schaumstoffseite auf die Wunde legen. Anschließend mit geeignetem Fixierungsmaterial z.B. DracoFixiermull stretch oder elastischen Fixierbinden befestigen. Dabei ist zu beachten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Die Wundauflage ist mit einer sterilen Schere zuschneidbar.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Zehenkappe** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

DracoFoam Zehenkappe darf nur einmal verwendet werden. **DracoFoam Zehenkappe** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist. **DracoFoam Zehenkappe** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für die erfolgreiche Wundbehandlung.



Gegenanzeigen:

DracoFoam Zehenkappe soll nicht verwendet werden bei:

- chirurgischen Implantaten
- Verbrennungen 3. Grades

DracoFoam Zehenkappe nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen wie z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid anwenden.

DracoFoam Zehenkappe soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan angewendet werden.

Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen.

Verfügbare Größen:

Zehenkappe klein (5,6 cm Umfang) PZN: 12543361

Zehenkappe mittel (8,6 cm Umfang) PZN: 15621305

Zehenkappe groß (10,6 cm Umfang) PZN: 12543378

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.



Rev.: 210629RW-13991-GA