



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Information für den Anwender



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie ilon® WundXtra Salbe verwenden. Die Salbe wird zur äußeren Behandlung eingesetzt.

In dieser Gebrauchsanweisung wird erläutert:

- Zweckbestimmung
- Anwendung
- Hauptbestandteil
- Sonstige Bestandteile
- Aufbewahrung/Haltbarkeit
- Mögliche Nebenwirkungen
- Warnhinweise
- Sonstige Informationen:
 - Schwangerschaft und Stillzeit
 - Wechselwirkungen
 - Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit

Zweckbestimmung:

Die Wirksamkeit der Salbe basiert auf den biologischen Eigenschaften von Fichtenharz (*Picea abies*). ilon® WundXtra Salbe ist für die äußerliche Anwendung bei infizierten und nicht-infizierten Wunden gedacht, sowohl im professionellen als auch im häuslichen Bereich. Sie eignet sich für akute (z. B. Schnitte, Abschürfungen, Risse, leichte Verbrennungen) und chronische Wunden (z. B. diabetische Wunden, OP-Wundkomplikationen, geöffnete Abszesse, Druckgeschwüre).

Der Salbeninhaltsstoff Harz wird mittels patentierter Methode gereinigt. Die Reinheit, die Zusammensetzung und die biologische und antimikrobielle Wirkung der Salbe werden bei jedem Los geprüft.

Anwendung:

Die betroffene Hautstelle reinigen und trocknen. ilon® WundXtra Salbe ein- bis zweimal täglich direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auftragen. Bei Bedarf die zu behandelnde Stelle mit Wundverband oder Pflaster schützen. ilon® WundXtra Salbe bildet auf der Wunde eine schützende Schicht, die zur effektiven Wundheilung beiträgt.

Hauptbestandteil:

Gereinigtes Harz der Fichte (*Picea abies*) 10%.

Sonstige Bestandteile:

Petrolatum, Paraffinum liquidum, Alcohol denat., Cera microcrystallina, Sorbitan oleate, Cera alba, Hydrogenated castor oil, Stearic acid.

Aufbewahrung / Haltbarkeit:

Nach dem Öffnen bei Zimmertemperatur 1 Jahr und ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.



12 M = Geöffnet haltbar.

Mögliche Nebenwirkungen:

Mögliche Nebenwirkungen bei der Behandlung mit ilon® WundXtra Salbe sind allergische Hautreaktionen, welche sich als lokale Reizung an der behandelten Stelle äußern können. Falls allergische Hautreaktionen auftreten, ist die Verwendung abubrechen. Bitte teilen Sie eventuelle Nebenwirkungen, Wechselwirkungen u. ä. dem Hersteller mit.

Warnhinweise:

Die Salbe nicht mit Augen oder Mund in Kontakt bringen. Nicht anwenden bei Unverträglichkeit gegen Harze. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei chronischen Wunden und geöffneten Abszessen befolgen Sie bitte die Anweisungen Ihres Arztes/Ihrer Ärztin.

Sonstige Informationen:*Schwangerschaft und Stillzeit:*

Zu unerwünschten Nebenwirkungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit liegen keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor.

Wechselwirkungen:

Klinisch relevante Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit:

Die Salbe hat keine Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit oder die Fähigkeit Maschinen zu bedienen.

Hersteller:

Repolar Pharmaceuticals Oy
Nihtisillantie 3
FIN-02630 Espoo, Finnland
www.repolar.com
info@repolar.com
Tel.: +358 40 7171 761

Vertrieb:

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20
D-76532 Baden-Baden
Germany
www.ilon.de
www.cesra.com
cesra@cesra.de
Tel.: 07221 95400

CE 0537

Medizinprodukt

Stand der Information: März 2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Produkt/Product: ILON WundXtra Salbe SAL GI 20g | |
| Format/Size: 145 x 190 mm | |
| Schriftgröße/Font-size: 9 pt - 36 pt | |
| Laetus-Code: --- | |
| Mat-Nr: 5041-02 | |
| 1. Farbe/Colour: ■ Black | |
| 2. Farbe/Colour: - - - | |
| 3. Farbe/Colour: - - - | |
| 4. Farbe/Colour: - - - | |
| 5. Farbe/Colour: - - - | |
| 6. Farbe/Colour: - - - | |
| Version: DU11. Umlauf | Datum/Date: 03.04.2024 |
| Agentur/Agency: Eigler Communication GmbH | |

5041-02