



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

MADE IN
GERMANY



MAPA GmbH
Industriestraße 21-25
27404 Zeven, Germany
www.billy-boy.de



CE 0197

EN ISO 4074

Artikel-Nr. 11.520.175
Rev. 11 (2024-03)

BILLY BOY®

WICHTIGE HINWEISE

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf das Kondom nicht mehr verwenden! Kondome kühl, trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Dennoch können Unverträglichkeiten in Form allergischer Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auftreten, falls der Benutzer allergisch auf Latex reagiert. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Bei richtiger Anwendung (s. Anwendungshinweise) schützen BILLY BOY Kondome vor Schwangerschaft und Übertragung von Krankheitserregern. Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren. Falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfallimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren.

GEBRUCHSHINWEISE

BEACHTEN SIE BITTE DIE NACHSTEHENDEN HINWEISSYMBOLS



Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen



Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!



Kondome nicht verwenden, wenn die Verpackungsfolie beschädigt ist. Gebrauchshinweise beachten



Kondome vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen



Kondome trocken lagern



Verwendbar bis



Hergestellt aus Naturkautschuklatex



Chargennummer Kondom



Chargennummer Packung



Medizinprodukt



Artikelnummer Packung



Hersteller

ANWENDUNGSHINWEISE

1. AUFREISSEN



Die Siegelfolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle („open here“) öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriefchen verwenden!

2. VORSPIEL



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis,

bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis ➡

und Körper des Partners kommt. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall das Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

3. NACHSPIEL



Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, um ein Abrutschen des Kondoms zu verhindern.

VORSICHT!

Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z. B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, Speisefette) verwenden. Diese greifen das Kondom an und lassen es schnell zerreißen. Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Vor der Anwendung von Gleitgel bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt. Bei analer Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern (z. B. BILLY BOY Gleitgel). Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis und Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gele etc.) angewendet, ➡

fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom beschädigen. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen. Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) ein neues Kondom verwenden.

PERSÖNLICHE UND ANONYME BERATUNG ZUM THEMA SAFER SEX UND VERHÜTUNG:

www.liebesleben.de